


Hinweise zum Einbau des KLEENPAK-Komplettfilters

1. Beachten Sie die Pfeile auf dem Gehäuse. Sie geben die korrekte Flussrichtung an.
2. Nach Einbau des Filters (Ein- und Auslass ist konnektiert) öffnen Sie bitte beide Entlüftungsventile durch je 1 Umdrehung (siehe auch Zeichnung unten).
3. Nach Öffnen der Wasserzufuhr schließen Sie die Entlüftungsventile (beginnend bei Nr. 2 auf der Auslassseite), sobald Wasser aus den Ventilen in konstantem Strahl austritt.

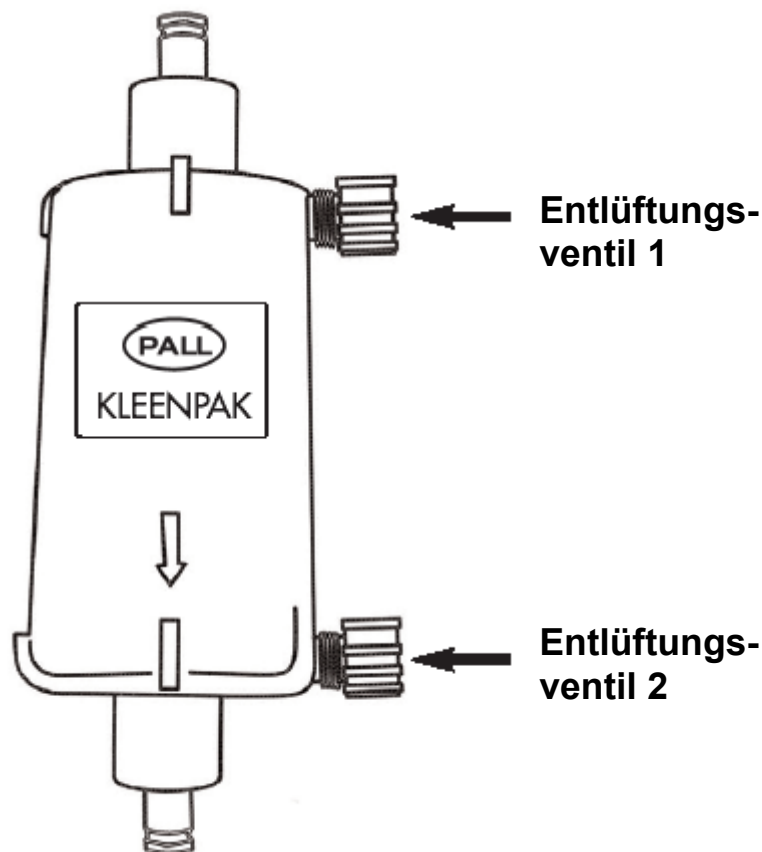

Ihr Fachhändler:

[ppm-marburg](http://ppm-marburg.de)

[peter pohl medizintechnik](http://peter.pohl-medizintechnik.de)

Tel.: 06421 - 931918, Fax: 06421 - 33205

info@ppm-marburg.de

www.ppm-marburg.de

Das Onlineshop-Portal mit über 60 Markenshops für med. techn. Geräte.

Seit 1997 - Innovative Technik und Dienstleistung, alles aus einer Hand.